

Para prevenir dificultades con su piel, le proponemos el siguientes protocolo de uso:



Paso 1:

Limpie su piel con una toallita húmeda sin perfume ni alcohol o bien con agua tibia y jabón neutro. Evite frotar con fuerza para evitar la irritación de la piel.



Paso 2:

Para favorecer un mejor sellado del estoma y evitar que el adhesivo se despegue prematuramente, puede utilizar la toallita especial Provox Skin Barrier. Esta toallita prepara la piel para que el adhesivo se pegue mejor y proporciona una fina película entre el adhesivo y la piel para evitar la irritación.



Paso 3:

Coloca el adhesivo sobre el estoma procurando que la parte más rígida (conector del HME) quede bien centrada sobre el estoma. Masajea suavemente la superficie del adhesivo y espera unos 2 minutos antes de comenzar a hablar.

Para retirar el adhesivo:



Paso 1:

Para facilitar la retirada del adhesivo y evitar la irritación de la piel, puede utilizar las toallitas Provox Remover sobre la superficie del adhesivo.



Paso 2:

Humedece ligeramente la superficie del adhesivo y retíralo suavemente evitando dar tirones.



Paso 3:

Limpia tu piel con un jabón neutro para ayudar a evitar la irritación y obtener una buen sello.